
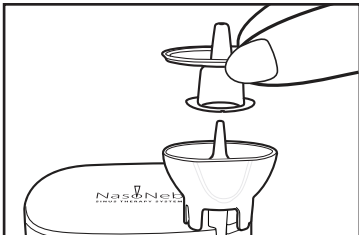
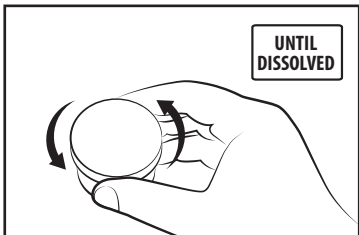
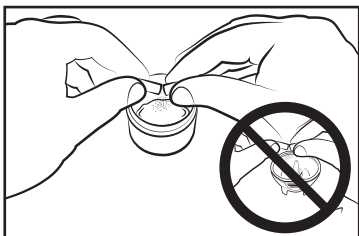
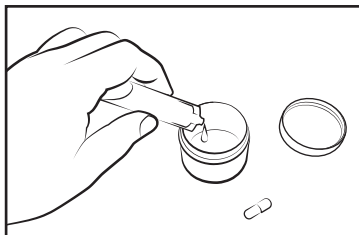
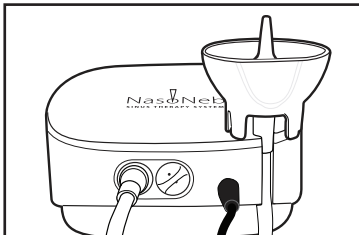


Sistema de terapia Nasoneb®. Guia rápida.

Este guia de início rápido não tem como objetivo substituir as instruções de uso fornecidas com o sistema de terapia NasoNeb®Sinus.

Uso do Sistema de terapia Nasoneb:

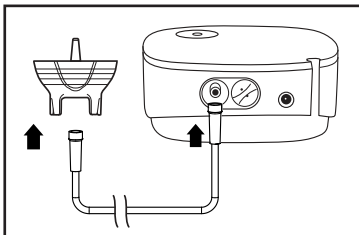

1. Lave as mãos com sabão e água morna, enxágue bem e seque-as adequadamente.
2. Conecte uma extremidade do tubo de plástico transparente ao compressor e a outra ao fundo do copo, conforme visto no primeiro desenho da vinheta
3. Coloque o copo, na parte inferior que se conecta ao tubo, entre a ranhura lateral do compressor
4. Misture o medicamento e a solução salina em um recipiente. Se você não precisa de medicação, pode colocar diretamente apenas a solução salina
5. Em seguida, adicione metade da mistura de medicamentos ao copo
6. Coloque a tampa nasal ou bocal dentro do copo
7. Sente-se adequadamente e em um local calmo, uma vez que dobre levemente a cintura e incline a cabeça para a frente aproximadamente 30°. Se possível, tenha um cronômetro para poder contar a hora ou o relógio
8. Coloque o bocal em uma das duas narinas, tomando cuidado para apontar o bocal diretamente em direção à narina; você deve apontar o bocal para a narina
9. Ligue o compressor ou a máquina pressionando por alguns segundos o botão superior do compressor, onde há um círculo azul com uma linha que o atravessa. Também inicie o cronômetro ao mesmo tempo ou observe o segundo relógio
10. Se necessário, você pode pausar e assoar o nariz após 3-5 segundos de administração, pois isso ajudaria a limpar o nariz e permitir que o medicamento penetre melhor em sua cavidade nasal
11. Permaneça na mesma narina por 1 minuto, administrando a dose da droga e da solução salina, dependendo da sua prescrição
12. Após a administração da dose na primeira narina, adicione a outra metade do medicamento restante ao copo.
13. Repita as etapas 6 a 11 com a outra narina

Após o tratamento

1. Desconecte o tubo do copo, separe o copo e a tampa ou bocal nasal
2. Limpe o copo e a tampa nasal ou o bocal com água morna e sabão e deixe secar
3. Limpe apenas a parte externa do tubo com um pano úmido. Nunca lave o interior do tubo, mantenha o interior do tubo completamente seco. Se a parte interna do tubo estiver com um pouco de umidade, conecte o tubo apenas ao compressor e ligue-o para que por alguns minutos o ar de exaustão interno seque o tubo
4. Limpe a parte externa do compressor com um pano úmido e seque-o cuidadosamente

Dicas adicionais

- Durante a administração, sempre desligue o compressor antes de remover o copo e o bico nasal da narina.
- Alguns medicamentos podem deixar espuma no copo, isso é normal. Simplesmente pare o tratamento quando restar apenas espuma no copo.

